

# Versameling van Haarmonsters

Die haarwortels bevat die DNA vir analise-doeleindes.



## Versamelingsprosedure:

- **Nota:** Vir skape en bokke word bloed benodig, nie hare nie.
- Verwyder enige los hare van die monster-versamelingsarea.
- Maak die monster-versamelingsarea skoon met 'n borsel/papierhanddoek om oortollige vuilheid te verwyder, indien nodig.
- Gryp hare naby die vel en trek direk weg van die vel (teen die rigting van groei).
- Versamel 20 of meer hare **met haarwortels**. (Oortollige hare sal gestoor word).  
**MOENIE** aan die haarwortels vat nie.  
Indien u die hare korter knip, stuur die deel **met haarwortels** aan.
- Plaas die hare in die bruin koevert wat voorsien is en verseël die koevert.  
**MOENIE** plastieksakkies gebruik nie, omdat kondensasie kan plaasvind wat kan veroorsaak dat die genetiese materiaal van die haarmonsters onbruikbaar is.
- Vul asb. die inligting van die dier op die stippellyne van die koevert in.
- Voltooi die verwysingsvorm.
- Versend **monsters** en **voltooi die verwysingsvorm** per gewone pos/spoedpos na:  
Unistel Geneeskundige Laboratoriums (Edms) Bpk, Suite 13, Privaatsak X22, Tygervallei, 7536
- **Neem kennis:** Indien 'n toets herhaal moet word a.g.v. foutiewe indiening / inligting of a.g.v. inherente monsterprobleme, is die aanvraer verantwoordelik vir die koste daarvan.



Kontak Unistel Geneeskundige Laboratorium by 021-938 9213 vir Guthrie kaarte, bruin koevert en verwysingsvorms.

### Vrywaring:

Terwyl alle redelike voorsorg getref word om enige foutiewe resultate te voorkom, aanvaar Unistel Geneeskundige Laboratoriums geen verantwoordelikheid vir enige verliese as gevolg van menslike of tegniese foute nie.